

---

## 米动医疗操作指南

---

2019年5月

版权申明：本产品目前处于测试试用阶段，有任何问题可以发邮件给我们：[lifeng@datawe.net](mailto:lifeng@datawe.net)






# 什么是米动 - 心电咖？

## 米动 - 心电咖：

米动 - 心电咖是以华米健康手环为心电数据采集设备并依托大微医疗心电咖智能心电信息化系统为用户提供心电自动诊断的联合品牌。

## 功能说明：

- 米动 - 心电咖是为华米AMAZFIT可穿戴动态心电记录仪提供的AI心电诊断服务系统，目前为测试体验版，只支持手环佩戴测量模式；
- 使用本系统时，请先用米动医疗APP采集心电数据并同步至云端，米动 - 心电咖只对米动医疗APP同步至云端的心电数据进行诊断；
- 本系统暂时利用“大微医疗”微信公众号对外提供测试服务；
- 本系统暂时只适用于手机号码注册的华米账户。

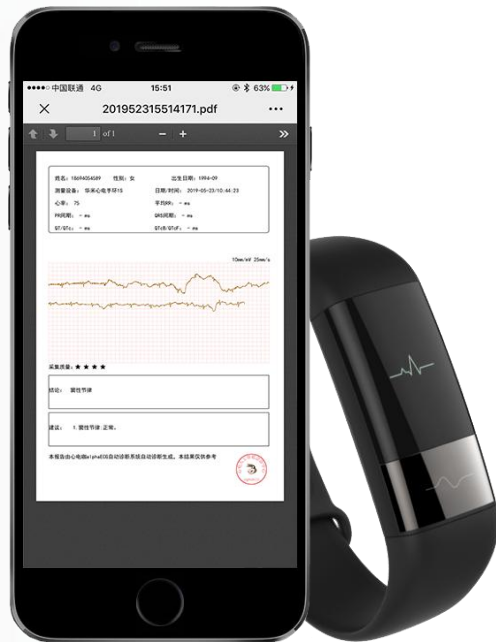



# 第一步：注册-登录-填写个人信息

- 按照手环说明书，下载“米动医疗”APP



1、已有账号请直接登录



2、新用户请先注册  
(目前仅支持手机号注册)



3、设置登录密码



4、填写基本信息，点击完成



## 第二步：添加设备-绑定手环




1、点击“绑定手环”



2、选择“绑定”按钮



3、开启手机蓝牙，自动和手环绑定

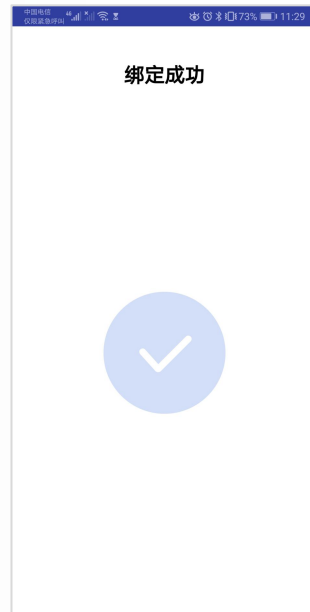

4、绑定成功



## 第三步：数据采集-同步上传



1、选择“手环测量”



2、手指贴于电极处  
进行数据采集




3、采集中



4、数据采集成功，且  
自动上传数据



## 第四步：进入“大微医疗”微信公众号

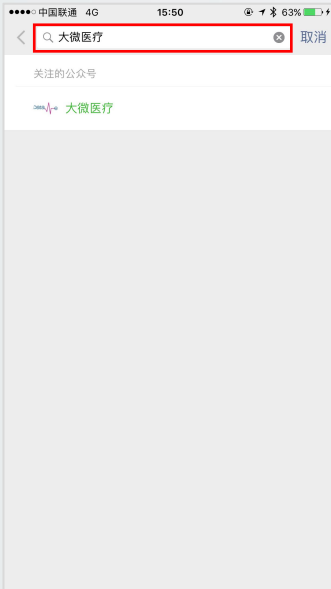

1、搜索“大微医疗”公众号并关注




2、点击右下角“心电咖”



3、选择“米动心电”点击进入



## 第五步：华米认证和授权

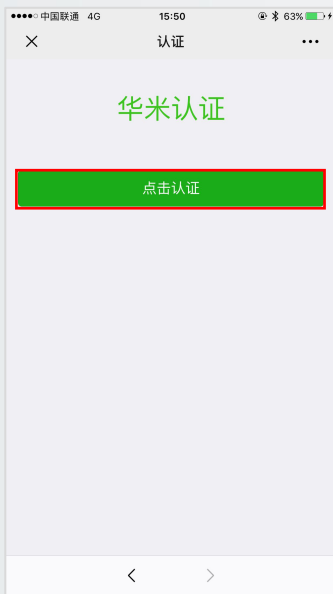

1、“点击认证”进行华米认证



2、输入之前使用手机号进行注册的米动医疗帐号及密码进行登录，点击“登录”



3、点击“允许”



## 第六步：进入米动-心电咖（Beta版）



1、“心电列表”将显示每一次的测量数据



2、“个人中心”可以看到自己的基本信息及历史报告





# 第七步：AI诊断-推送报告-查看报告



1、选择需要分析的数据  
栏（如图）




2、弹窗选择分析方式  
（推荐AI高级分析,可获得  
更多心电图指标）



3、出现“操作成功提示  
框”表明分析成功



4、回到“大微医疗”公  
众号首页, 将看到推送报  
告信息, 点击即可查看报  
告

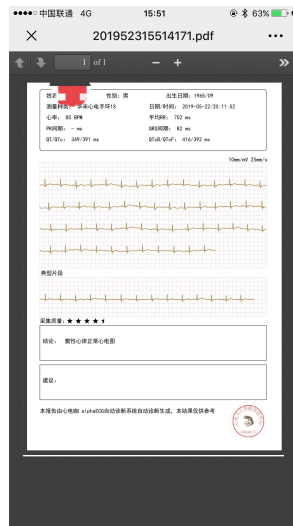

5、查看AI诊断报告



# 第八步：分享转发报告-查看历史报告



1、如需转发可长按“评估报告通知”，出现选择框后，点击“转发”



2、如果需要查看历史报告：点击右下角“心电图”



3、选择“米动心电”点击进入



4、“个人中心”页面，点击“历史报告”可以查看之前的诊断报告记录（如图）



5、选择要查看的历史报告，点击“查看报告”可以进行在线浏览（如图）